

SPRAY DHP

MOUSSE DETERGENTE DÉSINFECTANTE

POUR SURFACES HAUTES ET DISPOSITIFS MEDICAUX

INVASIFS et NON-INVASIFS.



DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection des

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical.
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non-invasifs (générateurs d'hémodialyses, sondes d'écographies, unit dentaires....)

FORMULE

Composition: Propriate d'ammonium quaternaire : 0,21% m/m, Digluconate de chlorexidine : 0,09% m/m (CAS : 18472-51-0), agents de surface non-ioniques, agents sequestrants, excipients.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur la surface ou le DM à nettoyer et désinfecter en s'assurant de mouiller complètement la surface.

Utiliser un non-tissé/tissu propre pour bien répartir le produit sur toute la surface.

Laisser agir selon l'activité anti-microbienne recherchée. Ne pas rincer.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN 16615 EN 13727 EN 14561	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae	2 min 5 min 10 min
	EN 1276 EN 13697	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, E. coli	2 min 5 min
	EN 13727	Enterococcus faecium VRE	5 min
LEVURICIDE	EN 16615	Candida albicans	2 min
	EN 13624 EN 1650 EN 13697		5 min
	EN 14562		10 min
	EN 13624	Candida auris	5 min
FONGICIDE	EN 1650 EN 13624 EN 13697	Aspergillus brasiliensis	15 min
VIRUCIDE	EN 14476	Vaccinia virus Norovirus, Adénovirus, Rotavirus, virus PRV (virus modèle de l'hépatite B), virus BVDV (virus modèle de l'hépatite C)	5 min 15 min 5 min
SPORICIDE	EN 13704 EN 17126	Clostridium difficile	15 min

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Aucun pictogramme de danger.

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Produit destiné aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

REF : DE177

Spray 750ml.

Carton de 12 sprays.

Palette de 50 cartons.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

EAN13 : 3615240000177.

Dispositif médical classe IIb.

Produit fabriqué en France.

